

ANULIND®

Mikroklister mit Propolax® für Erwachsene

Propolax®

Komplex aus Einfachzuckern aus weißen Weintrauben und Mehrfachzuckern aus Aloe und Eibisch, angereichert mit hydroglycerischem Propolis.



6 Mikroklister mit
einer Einzeldosis von 10g

INDIKATIONEN:

Anulind® Mikroklister mit Propolax® ist ein Abführmittel auf der Basis natürlicher Extrakte und zuckerhaltiger Bestandteile, welches die Schleimhaut des Enddarms schützt und beruhigt. Es wirkt der Belastung und Reizung durch Verstopfung entgegen. Anulind® zieht Wasser in den Stuhl, wodurch es fäkale Masse aufweicht und somit die Entleerung erleichtert. Anulind® enthält Propolax®, einen Komplex, der reich an Einfach- und Mehrfachzuckern sowie Melanoidinen ist, aus ausgewählten, speziell verarbeiteten weißen Weintrauben gewonnen und zusätzlich mit Mehrfachzuckerfraktionen aus Aloe, Malve und Eibisch angereichert wird. Der Propolax®-Komplex enthält Kohlenhydrate und Polyole, welche die Entleerung bei Verstopfung durch einen sanften osmotischen Mechanismus fördern. Aloe, Malve und Eibisch haben feuchtigkeitsspendende, erweichende, schleimähnliche sowie gleitfilmartige Wirkung, wodurch die Reibung während des Stuhlgangs verringert wird. Darüber hinaus entfaltet der Propolis-Hydroglycerin-Extrakt eine Schutzwirkung auf die Schleimhaut des Enddarms.

ZUSAMMENSETZUNG:

deionisiertes Traubenmostkonzentrat; Sorbitol; Wasser; Malvenfluidextrakt; Aloe Barbadensis Gel; Eibisch Fluidextrakt; Propolis Hydroglycerinextrakt; Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat, Kaliumsorbat.

DOSIERUNG:

Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahren: ein 10g Mikroklister nach Bedarf. Bei hartnäckiger Verstopfung 2 aufeinanderfolgende Dosen anwenden.

ANWEISUNG FÜR DEN GEBRAUCH:







ZUR REKTALEN ANWENDUNG. Jedes Einzeldosis-Mikroklister ist einzeln in einer gebrauchsfertigen Verpackung eingeschweißt, um Hygiene und einfache Anwendung zu gewährleisten. Entfernen Sie die Kappe des Einzeldosisbehälters. Zur Erleichterung der Einführung in den Enddarm kann es hilfreich sein, auf die Spitze des Applikators einen Tropfen der Lösung zu verteilen. Ziehen Sie den Applikator wieder heraus, während Sie gleichzeitig das Mikroklister zusammengedrückt halten.

WARNHINWEISE:

Nicht anwenden, wenn Sie überempfindlich oder allergisch gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe sind. Bei anhaltender Verstopfung ist es wichtig, einen Arzt zu konsultieren, um andere Erkrankungen auszuschließen. Mikroklistiere dürfen nicht bei akuten Schmerzen im Bauchbereich oder Schmerzen unbekannter Ursache angewendet werden. Mikroklistiere sind Einwegprodukte und dürfen nicht wiederverwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist oder das Verfallsdatum überschritten wurde.

LAGERUNG:

an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren, vor direktem Licht, Hitze sowie niedrigen Temperaturen schützen.

SYMBOL	BEDEUTUNG	SYMBOL	BEDEUTUNG	SYMBOL	BEDEUTUNG
	Hersteller		Chargenbezeichnung		Hier entsorgen
	Verfallsdatum		142		Nicht wiederverwenden

**HERSTELLER:**

NOVA ARGENTIA S.r.l.
Via Carlo Porta 49
Gorgonzola, Milano, Italien
contact@novaargentia.it
www.novaargentia.it

**VERTRIEB:**

Germania
Pharmazeutika GmbH
1150 Wien, Österreich
office@germania.at
www.germania.at

Medizinprodukt  0477

Gesamtnettogewicht: 60g e
(6 Einzeldosen Mikroeinläufe à 10g)

